




Raizer II® - stappenplan

1) Plaats de liftmodule van de **Raizer II®** onder de **knieën** van de cliënt en zorg ervoor dat de knieën **ligt gebogen** zijn.



2) Leg alle **onderdelen** van de **Raizer II®** klaar om de tilunit op te bouwen. Let erop dat u bij het monteren een **click** hoort dit geeft aan dat alles geborgd is.

3) Plaats als eerste de **rugleuningen** aan **beide** zijden van cliënt

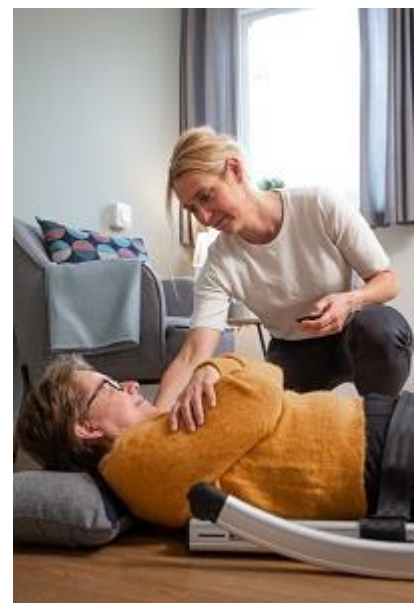



4) Bij het plaatsen van de rugleuningen kunt u cliënt vragen om iets op de **zijde** te draaien dit vergemakkelijkt het plaatsen

5) De **hefpoten** worden op de zijkant van de **Raizer II®** geklikt. Let er nu ook weer goed op dat u een **click** hoort als indicatie dat dit goed is gebeurd



6) **Controleer** alle verbindingen.
U bent nu klaar om de cliënt te gaan tillen.

7) **Ondersteun** schouder en nek van cliënt bij het tillen.
Fysiek contact werkt geruststellend.



8) cliënt is nu reeds in **halfzittende** houding gebracht met de **Raizer II®** zonder fysieke belasting voor zowel u als cliënt.



9) cliënt zit nu en kan met **ondersteuning** zelf gaan staan of een **transfer** maken naar een andere stoel

